



CARA Fremragende søvn.

Perfekt pasform, høj bærekraft, behagelig og støjsvag udånding samt god hudkompatibilitet – Nasal- og mund-næse-masken i CARA-familien perfektionerer disse krav på moderne vis.

Vores succesfulde CARA-masker overbeviser med deres lethed, de blødt tætsluttende og pasnøjagtige maskepuder, de gode indstillingsmuligheder samt andre fiffige detaljer.

CARA byder på den rigtige løsning til stort set alle maskebærere.



Maskepude - pasnøjagtig og stabil

Det første indtryk passer. Maskepuden er blød, elastisk og tætsluttende. Alligevel sidder den stabilt på ansigtet og tilpasser sig nøjagtigt til de pågældende konturer - optimalt med henblik på en langvarig bærekraft selv uden pandepolster.

Gennemprøvet perfektionering - uovertruffen støjsvag

Det spalteformede udåndingssystem tæt på kugleleddet er gennemprøvet gennem årtier. CARA-familien perfektionerer dette. Færre dele gør håndteringen nemmere, reducerer vægten og skåner miljøet på grund af mindre materialeproduktion og -bortskaffelse.

Der opretholdes en diffus bortstrømning, så hverken patienten eller sengespartneren forstyrres, samt et lukket område foroven, så der ikke strømmer luft i retning af øjnene.

CARA er prisbelønnet


CARA har ikke kun overbevist dig, den blev belønnet med den internationale designpris Focus Open.

Også det uafhængige institut Hohenstein er overbevist. Kun fejlfrie tekstiler uden sundhedsfarlige stoffer får det verdenssanerkendte segl OEKO-TEX STANDARD 100 - således også hovedbåndet i CARA-familien.



Fordelene ved CARA

- Blød og tætsluttende maskepude - i 3 størrelser
- Støjsvag og diffust udåndingssystem **1a**, **1b**
- Letvægt **2**
- Farvekodet hovedbånd – farvet område (petrol eller syrah) foroven
- Indstillingsmulighed for det øverste hovedbånd sikrer en perfekt placering på alle hovedstørrelser **3**
- Valg mellem indføring eller fast montering **4a**, **4b**
- Udløersnor til hurtig afmontering **5**
- Kugleled med 360°- og 3D-drejning sikrer grænseløs bevægelsesfrihed **6**
- Ekstremt belastbart materiale

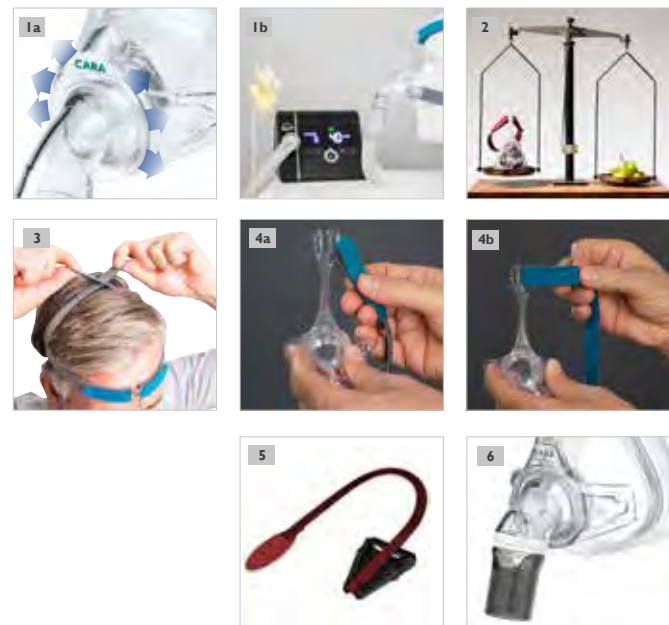

CARA - Made in Germany

Så nem er CARA at tage på.



Løsn de to clips fra masken.



Stryg hovedbåndet over dit hoved.



Fastgør clipsene nederst på masken.



Indstil de øverste hovedbånd så løst som muligt, men også så fast som nødvendigt.



Indstil ligeledes de nederste hovedbånd så løst som muligt, men også så fast som nødvendigt.



Indstil hovedbåndet på hovedet, så det ikke kolliderer med øreflipperne foroven.



Indstil pandestøtten så løst som muligt. Den skal ikke slutte tæt.



Vores brugervideo kan findes på YouTube.



Reserve dele				
Hovedbånd CARA inkl. båndclips XS: WM 25191 Standard: WM 25192	Hovedbånd CARA Full Face inkl. båndclips WM 25243	Maskepude CARA Str.XS: WM 25189 Str.S/M: WM 25238 Str.M/L: WM 25239	Maskepude CARA Full Face Str.S: WM 25601 Str.M: WM 25602 Str.L: WM 25603	Udløsesnor CARA Full Face WM 25623

Yderligere informationer om vores terapiløsninger, tilbehør og maskesystemer findes på loewensteinmedical.de

Tekniske data		
	CARA	CARA Full Face
Produktklasse iht. direktiv 93/42/EØF	II a	II a
Mål (B x H x D)	72 x 112 x 70 mm (størrelse XS) 72 x 117 x 70 mm (størrelse S/M) 72 x 118 x 70 mm (størrelse M/L)	93 mm x 145 mm x 89 mm (størrelse S) 95 mm x 160 mm x 90 mm (størrelse M) 95 mm x 174 mm x 91 mm (størrelse L)
Vægt	58 g (størrelse XS) 59 g (størrelse S/M) 60 g (størrelse L/M)	93 g (størrelse S) 97 g (størrelse M) 102 g (størrelse L)
Terapitryk	4 hPa - 30 hPa	4 hPa - 25 hPa
Slangetilslutning, konus iht. EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (han)	Ø 22 mm (han)
Temperaturområde • drift: • opbevaring:	+5 °C til +40 °C -20 °C til +70 °C	+5 °C til +40 °C -20 °C til +70 °C
Strømningsmodstand • ved 50 l/min • ved 100 l/min	0,2 hPa 0,9 hPa	0,15 hPa 0,5 hPa
Strømningsmodstand nødudåndingsventil • inspiration ved 50 l/min • eksspiration ved 50 l/min	–	0,6 hPa 0,8 hPa
Lydtryk nødudåndingsventil • åbn: • luk:	–	0,5 hPa 2,2 hPa
Angivet støjemissionsværdi iht. ISO 4871: • lydtrykniveau: • lydeffektniveau: • usikkerhedsfaktor:	18 dB(A) 26 dB(A) 3 dB(A)	19 dB(A) 27 dB(A) 3 dB(A)
Brugsvarighed	op til 12 måneder ¹	op til 12 måneder ¹
Anvendte standarder	EN ISO 17510-2:2009	EN ISO 17510-2:2009

¹ De materialer, som bruges til fremstilling af masker, ældes, hvis de f.eks. udsættes for aggressive rengøringsmidler. I enkelte tilfælde kan det derfor være nødvendigt at udskifte maskedelene tidligere.

Udstyrsbetegnelse	Størrelse	Artikelnr.
CARA Nasal	XS	WM 25590
CARA Nasal	S/M	WM 25600
CARA Nasal	M/L	WM 25610

Udstyrsbetegnelse	Størrelse	Artikelnr.
CARA Full Face	S	WM 25630
CARA Full Face	M	WM 25640
CARA Full Face	L	WM 25650

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Tyskland
Tlf.: +49 40 547 02 0
Fax: +49 40 547 02 461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de



© Ophavsretligt beskyttet. Enhver form for mangfoldiggørelse må kun ske med udtrykkelig tilladelse fra Löwenstein Medical Technology. Al tryktekniske ansøger tages der forbehold med hensyn til alle angivelser.

CE 0197



CARA
Fremragende søvn.

